

GUIDE DE SUIVI

DEFIBRILATEUR FRED Easy et BOITIER AIVIA 200

Important :

Il n'y a aucun lien entre le défibrillateur et le boîtier. Le boîtier sert seulement à protéger le défibrillateur de la pluie et du froid.

Procédure de contrôle du défibrillateur (DAE) et du boîtier

Le DAE est un appareil d'urgence qui doit toujours être en parfait état de fonctionnement.

Placé en extérieur dans un boîtier, le contrôle du boîtier est nécessaire pour assurer l'intégrité du DAE et son fonctionnement.

Il est souhaitable de procéder à des contrôles réguliers selon la planification ci-dessous :

- ♦ Contrôle hebdomadaire
- ♦ Contrôle trimestriel
- ♦ Contrôle journalier par grand froid
- ♦ Entretien annuel du boîtier
- ♦ Contrôle après chaque utilisation

Les protocoles de contrôle ainsi qu'une « check-list » vous sont proposés.

L'ensemble des relevés doivent-être archivés à la mairie permettant de garantir le suivi de vos équipements.



BOITIER



DEFIBRILLATEUR

AVANT MISE EN SERVICE

VERIFICATION DE TOUS LES ELEMENTS DU DEFIBRILLATEUR

Marque et type de défibrillateur : SCHILLER – DAE FRED Easy

N° de série : _____

Date de mise en service : / / 20....

Durée de la garantie : 5 ans


Notice d'utilisation présente : OUI ☐

NON ☐

Date de péremption des électrodes :

..... / / 20....

..... / / 20....

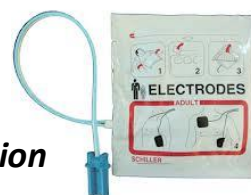

Les électrodes doivent être remplacées dès que la date de péremption est atteinte, même si elles n'ont pas été utilisées.

Date limite d'utilisation de la pile de réserve (indiquée sur son boîtier):

..... / / 20....

Dès que la limite d'utilisation de la pile est atteinte, celle-ci doit être remplacée même si elle n'a pas servi.

La mairie doit disposer d'une pile d'avance (pile lithium 12V 2800 mAh NON RECHARGEABLE) stockée dans un endroit sec et tempéré (15°C à 25°C).



Dans le boîtier AIVIA 200, les éléments suivant doivent être présents :

- Sacoche de transport
- Défibrillateur avec 1 pile et 1 carte SD
- 2 paires d'électrodes adultes (dont 1 connectée au DAE)
- 1 kit premiers secours avec ciseaux, rasoirs, gants, compresses ou paquet de mouchoirs en papier.



CONTRÔLE HEBDOMADAIRE

A REALISER TOUTES LES SEMAINES AU MINIMUM (de préférence le lundi car l'appareil réalise un autotest plus poussé le dimanche) :

CONTRÔLE DU DEFIBRILLATEUR

CONTROLE

S'assurer que le voyant vert du DAE clignote



DEFAUT

➡ Si le voyant vert ne clignote pas : un dysfonctionnement a été détecté par l'appareil.

> Une remise en état de marche est indispensable.

N'hésitez pas à vous reporter à la notice d'utilisation du DAE.

MARCHE A SUIVRE

➡ Sortir le DAE du boîtier et regarder le message d'erreur sur l'écran.

➡ Dans le cas d'un **défaut technique**, la plupart du temps, il est conseillé d'éteindre l'appareil et de le remettre en service.

Après cette opération, si le problème persiste, contacter :

1. Service d'Assistance Technique SCHILLER
N° INDIGO : 0.820.20.75.12
2. Le Pays de la Déodatie : 03.29.56.92.99

➡ Dans le cas d'un **problème de pile** (BATTERY en anglais), insérer une pile neuve que vous devez avoir d'avance à la mairie.

Après cette opération, si le problème persiste, contacter :

1. Service d'Assistance Technique SCHILLER
N° INDIGO : 0.820.20.75.12
2. Le Pays de la Déodatie : 03.29.56.92.99

➡ **Prévoir le rachat d'une pile neuve.**

CONTRÔLE HEBDOMADAIRE

CONTRÔLE EXTERNE DU BOITIER

CONTROLE

DEFAUT

MARCHE A SUIVRE

Contrôler visuellement les scellés



Si les scellés ont été forcés, vérifiez la présence de tous les éléments du DAE, ainsi que le bon fonctionnement de ce dernier.

Procéder au remplacement des éléments manquants.

Le DAE est protégé par une sacoche contenant (outre le DAE) : 2 paires d'électrodes (patch) et 1 kit « premiers secours ».


S'adresser au Pays de la Déodatie pour le réapprovisionnement : 03.29.56.92.99

Contrôle visuel du mode nocturne :

Le boîtier est équipé d'une cellule de luminosité. Des voyants blancs clignotent la nuit pour signaler l'emplacement du boîtier.

Les voyants blancs ne clignotent pas

Vérifier que le boîtier est bien sous tension.

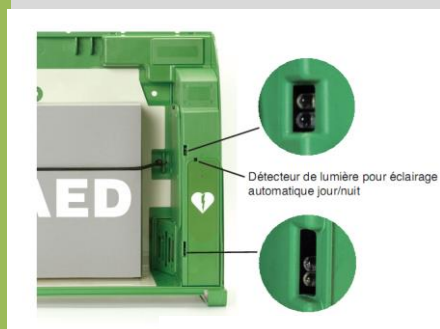

Après cette opération, si le problème persiste, contacter :

1. Service d'Assistance Technique SCHILLER N° INDIGO : 0.820.20.75.12
2. Le Pays de la Déodatie : 03.29.56.92.99

FEUILLE DE SUIVI HEBDOMADAIRE

MAIRIE DE _____ MOIS DE _____		DATE DES CONTRÔLES			
		/...../20...	/...../20...	/...../20...	/...../20...
		Nom du contrôleur : _____ _____	Nom du contrôleur : _____ _____	Nom du contrôleur : _____ _____	Nom du contrôleur : _____ _____
Aspect général du boîtier (état extérieur)	Intègre	☐	☐	☐	☐
Contrôle des scellés	Non forcés	☐	☐	☐	☐
Contrôle visuel du mode nocturne	Opérationnel	☐	☐	☐	☐
Alertes de fonctionnement du boîtier	Pas de voyants rouges clignotants	☐	☐	☐	☐
Autotest du défibrillateur, contrôle visuel	Voyant vert clignote	☐	☐	☐	☐
Remarques éventuelles : 					

Rappel :

Le défibrillateur effectue un autotest quotidien et/ou hebdomadaire qu'il annonce par un bip sonore.
En cas d'anomalie, reportez-vous au guide de suivi et/ou aux notices d'utilisation des équipements.

➤ **FEUILLE A ARCHIVER A LA MAIRIE**

CONTRÔLE TRIMESTRIEL

TOUS LES 3 MOIS, il est nécessaire de procéder à un contrôle détaillé.
Pour cela, il sera nécessaire d'ouvrir le boîtier.

La liste des contrôles sont détaillés ci-après.

CONTRÔLE DU DEFIBRILLATEUR

CONTROLE

DEFAUT

MARCHE A SUIVRE

S'assurer que le voyant vert
du DAE clignote



➡ Si le voyant vert ne clignote pas : un dysfonctionnement a été détecté par l'appareil.

> Une remise en état de marche est indispensable.

N'hésitez pas à vous reporter à la notice d'utilisation du DAE.

➡ Sortir le DEA du boîtier et regarder le message d'erreur sur l'écran.

➡ Dans le cas d'un **défaut technique**, la plupart du temps, il est conseillé d'éteindre l'appareil et de le remettre en service.

Après cette opération, si le problème persiste, contacter :

1. Service d'Assistance Technique SCHILLER
N° INDIGO : 0.820.20.75.12
2. Le Pays de la Déodatie : 03.29.56.92.99

➡ Dans le cas d'un **problème de pile** (BATTERY en anglais), insérer une pile neuve que vous devez avoir d'avance à la mairie.

Après cette opération, si le problème persiste, contacter :

1. Service d'Assistance Technique SCHILLER
N° INDIGO : 0.820.20.75.12
2. Le Pays de la Déodatie : 03.29.56.92.99

➡ **Prévoir le rachat d'une pile neuve.**

CONTRÔLE TRIMESTRIEL

CONTROLE DU DEFIBRILLATEUR

CONTROLE

DEFAULT

MARCHE A SUIVRE

Vérifier la présence et la date de péremption des électrodes

(le défibrillateur doit disposer de deux paires d'électrodes : une connectée au défibrillateur, l'autre rangée dans la sacoche).



Péremption des électrodes à 2 mois.

Procéder au rachat, puis au remplacement des électrodes.

S'adresser au Pays de la Déodatie pour le réapprovisionnement :
03.29.56.92.99

Vérification de la présence de la carte SD



Absence de la carte

Procéder au rachat, puis au remplacement de la carte SD.

S'adresser au Pays de la Déodatie pour le réapprovisionnement :
03.29.56.92.99

CONTRÔLE TRIMESTRIEL

CONTRÔLE EXTERNE DU BOITIER

CONTROLE


DEFAUT

MARCHE A SUIVRE

Contrôle visuel du mode nocturne

Le boîtier est équipé d'une cellule de luminosité.

Des voyants blancs clignotent la nuit pour signaler l'emplacement du boîtier.

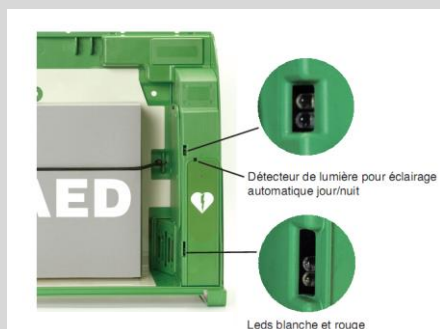

➡ Les voyants blancs ne clignotent pas

➡ Vérifier que le boîtier est bien sous tension.

Après cette opération, si le problème persiste, contacter :

1. Service d'Assistance Technique SCHILLER
N° INDIGO : 0.820.20.75.12
2. Le Pays de la Déodatie : 03.29.56.92.99

Contrôle de l'alerte d'ouverture de porte

➡ A l'ouverture de porte, l'alerte visuelle est donnée par le clignotement des voyants rouges et une alarme sonore est activée pendant 3 minutes environ.

➡ En cas de dysfonctionnement d'une des deux alarmes :
- Vérifier la mise sous tension électrique du boîtier.

Après cette opération, si le problème persiste, contacter :

1. Service d'Assistance Technique SCHILLER
N° INDIGO : 0.820.20.75.12
2. Le Pays de la Déodatie : 03.29.56.92.99

FEUILLE DE SUIVI TRIMESTRIEL

MAIRIE DE _____ MOIS DE _____		DATE DES CONTRÔLES			
		/...../20...	/...../20...	/...../20...	/...../20...
		Nom du contrôleur : _____ _____	Nom du contrôleur : _____ _____	Nom du contrôleur : _____ _____	Nom du contrôleur : _____ _____
Aspect général du boîtier (état extérieur)	Intègre	☐	☐	☐	☐
Contrôle visuel du mode nocturne	Opérationnel	☐	☐	☐	☐
Alertes de fonctionnement du boîtier	Pas de voyants rouges clignotants	☐	☐	☐	☐
Contrôle de l'alarme sonore de l'ouverture de porte du boîtier	Opérationnelle	☐	☐	☐	☐
Aspect général du défibrillateur (état extérieur)	Intègre	☐	☐	☐	☐
<u>Accessoires :</u> Présence et état des électrodes (2 paires)	Date limite d'utilisation valide	☐	☐	☐	☐
Vérification de la présence de la carte SD	Présente	☐	☐	☐	☐
Autotest du défibrillateur contrôle visuel	Voyant vert clignote	☐	☐	☐	☐
<u>Remarques éventuelles :</u>					

NE PAS OUBLIER DE REPOSER UN SCELLÉ APRES LA FERMETURE DE LA PORTE

Rappel :

Le défibrillateur effectue un autotest quotidien et/ou hebdomadaire qu'il annonce par un bip sonore.
En cas d'anomalie, vous reporter au guide de suivi et/ou aux notices d'utilisation des équipements.

➤ **FEUILLE A ARCHIVER A LA MAIRIE**

CONTRÔLE JOURNALIER PAR GRAND FROID EN DESSOUS DE -15°C

CONTRÔLE DU BOITIER PAR GRAND FROID

CONTROLE


DEFAULT

MARCHE A SUIVRE

Surveillance journalière

Durant les périodes de grand froid (en dessous de -15°C), vérifier que l'alerte de température ne s'est pas déclenchée.

➡ Clignotement continu des voyants rouges du boîtier.

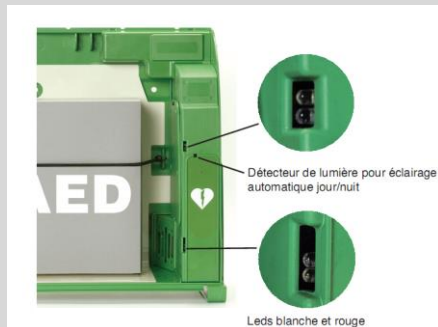

➡ Sortir le défibrillateur et le mettre dans une pièce tempérée.
Couper l'alimentation électrique du boîtier.

Remettre en service (boîtier et DAE) quand la température REMONTE au-dessus de -15°C.

FEUILLE DE SUIVI JOURNALIER GRAND FROID

Température extérieure inférieure à -15°C

[illegible]

➤ **FEUILLE A ARCHIVER A LA MAIRIE**

ENTRETIEN ANNUEL DU BOITIER

Une fois par an, il est nécessaire de dépoussiérer le ventilateur de brassage d'air du boîtier (situé en bas à droite).

Pour ce faire, utilisez soit :

- ♦ 1 pinceau
- ♦ 1 aspirateur
- ♦ 1 bombe d'air sous pression



Localisation du ventilateur

CONTRÔLE APRES CHAQUE UTILISATION

Après chaque utilisation, vous devez vous assurer que tous les éléments du défibrillateur sont présents et fonctionnels :

Dans le boîtier AIVIA 200, les éléments suivant doivent être présents :

- Sacoche de transport
- Défibrillateur avec 1 pile et 1 carte SD
- 2 paires d'électrodes adultes (dont 1 connectée)
- 1 kit premiers secours avec ciseaux, rasoirs, gants, compresses ou paquet de mouchoirs en papier.



Remplacement des électrodes utilisées :

Il est prévu que le réapprovisionnement des électrodes après utilisation se fasse par l'intermédiaire du SMUR, s'il est appelé sur place.

Cependant, d'autres services de secours peuvent être dépêchés.

> Ces derniers ne sont pas dans l'obligation de remplacer les électrodes utilisées.



Pour le réapprovisionnement des électrodes, adressez-vous au :

Pays de la Déodaté


60, rue de la Bolle - 2ème étage

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

Tél : 03.29.56.92.99 – Fax : 03.29.56.77.35

Vérification de la capacité de la pile :

Après utilisation, la capacité de la pile est à vérifier. Le symbole

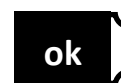

doit être



Si le symbole clignote à l'écran accompagné d'un signal sonore, c'est que la capacité est trop faible et que la pile est à remplacer.

> Dans ce cas, utiliser la pile d'avance stockée à la mairie.

Il est alors indispensable de réapprovisionner une nouvelle pile.

Pour ce faire, adressez-vous au :

Pays de la Déodaté

60, rue de la Bolle - 2ème étage

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

Tél : 03.29.56.92.99 – Fax : 03.29.56.77.35

CONTRÔLE APRES CHAQUE UTILISATION

Vérification de la présence de la carte SD :

Lors d'une intervention, les médecins auront peut-être besoin de lire les données enregistrées sur la carte du DAE.

Comme pour les électrodes, le SMUR dispose de cartes SD vierges pour remplacer celle de votre DAE. Cependant, d'autres services de secours peuvent-être dépêchés.

Dans ce dernier cas, il est indispensable de réapprovisionner une nouvelle carte SD.

Pour ce faire, adressez-vous au :

Pays de la Déodaté

60, rue de la Bolle - 2ème étage

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

Tél : 03.29.56.92.99 – Fax : 03.29.56.77.35

Vérifier également la composition du kit « Premiers Secours ».

Il doit contenir :

- 1 paire de ciseaux
- des rasoirs
- des gants
- des compresses ou paquet de mouchoirs en papier

Réapprovisionner les éléments manquants

➔ Lorsque toutes ces vérifications sont faites, réaliser un
CONTROLE TRIMESTRIEL du BOITIER
et remettre en service l'ensemble.

Ne pas oublier de reposer un scellé

Coordonnés du service après-vente



SCHILLER

The Art of Diagnostics

Coordonnées HOTLINE Grand Public :



N° Indigo

0 820 20 75 12

0,09 € TTC / MN

Horaires d'ouverture de la Hotline : *du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (hors jours fériés).*

Formulaire électronique de demande d'intervention :

<http://satgp.schillerfrance.fr/>

Courriel : satgp@schillerfrance.fr

Fax : 03 88 63 28 40

Centre d'Assistance Technique :

**SCHILLER France
7 rue Maryse Bastié
67500 HAGUENAU**